

Bruksanvisning ***Gerlach Fotvårdsbord*** ***Serie AT/NT Mini***

Översättning av bruksanvisning i original

Utgiven 01/2022



Kära Kund

Vi gratulerar Dig till ditt köp av detta fotvårdsbord.

Du har härmed förvärvat ett högvärdigt arbetsredskap, som med rätt vård kommer att tjäna Dig under lång tid.

Fotvårdsbordet är, med rätt tillbehör, väl anpassat för de olika fotvårdsmaskinerna SATURN AT MICRO, LUNA AT MICRO, TRITON AT MICRO, TITAN med dammsug och med SIRIUS NT MICRO och NEPTUN NT MICRO med vattenspray eller PUCK MCRIO

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan Du använder fotvårdsbordet.

Tack för Ditt samarbete

Er

Eduard Gerlach GmbH, Bäckerstrasse 4-8, D-32312 Lübbecke

Tel. +495741/330-0, Fax +495741/347300

1. Tekniska data

Nätspänning	230 V
Ineffekt:	3600 W (max.)
Skyddsklass	I- BF
Mått (utan utbyggnader)	
Bredd x Djup x Höjd (mm)	495 x 480 x 750
Vikt:	45,3kg

Eduard Gerlach GmbH förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning företa tekniska och optiska förändringar på sina produkter.

2. Leveransomfång

- 1 Gerlach fotvårdsbord AT/NT mini
- 2 Bruksanvisningar, tyska och svenska

3. Säkerhetsanvisningar



Säkerhetsanvisningar i de enskilda kapitlen är utmärkta med denna symbol, och dessa skall ovillkorligen följas.

4. Systemtillhörighet

Fotvårdsbordet kan med fördel användas tillsammans med följande fotvårdsmaskiner.

- PUCK fotvårdsmaskin.
- NEPTUN NT MICRO fotvårdsmaskin med vattenspray.
- SIRIUS NT MICRO fotvårdsmaskin med vattenspray.
- SATURN fotvårdsmaskin med dammsug.
- LUNA fotvårdsmaskin med dammsug.
- TRITON fotvårdsmaskin med dammsug.
- TITAN fotvårdsmaskin med dammsug.

Tillägg till bruksanvisning i original:

Även maskiner från HADEWE kan användas tillsammans med bordet

5. Handhavande

- Anslut handstyckshållaren (OBS! tillbehör med medföljande skruvar) på vänster eller höger sida på enheten.
- Komplettera handstyckshållaren med handstycksadaptern för vatten- eller sprayhandstycke (OBS! tillbehör) genom att sätta i adaptern ovanifrån. Säkra adaptern med den medföljande skruven.

Nedan följer de nödvändiga stegen vid användning av fotvårdsmaskinerna SATURN AT MICRO, LUNA AT MICRO, TRITON AT MICRO, SIRIUS NT MICRO och PUCK.

Optimal placering av fotvårdsmaskinen är på utdragsskivan.

- Ställ maskinen på utdragsskivan.
- Sätt i maskinens nätkontakt i grenuttaget på baksidan av bordet.

Vänligen beakta följande:



Maximal ineffekt i grenuttaget är 3600 W.

Av säkerhetsskäl skall inget ytterligare grenuttag anslutas till bordets grenuttag.

Använd endast original reservdelar

Fotvårdsmaskinen som används, kan endast användas på ett säkert sätt om de till maskinen hörande tillbehören används. Handstycket måste därför fixeras i en säker hållare, så att det inte faller i golvet. Om andra än ovan nämnda fotvårdsmaskiner används påtar sig Eduard Gerlach GmbH inget ansvar. Detta gäller även för skador som uppkommit genom användande av olämpliga eller tillbehör som inte passar.

6. Allmänna säkerhetsanvisningar

Fotvårdsbordet får endast ställas på ett horisontellt, jämnt underlag. Det finns en tipprisk om bordet ställs på sluttande ytor (5° - 10°). Tillse att de fyllda lådorna inte dras ut fullt ut samtidigt.

Följ den anslutna maskinens bruksanvisning för användning av denna.

7. Hygien

- Bordets arbetsyta kan rengöras med ett alkohol- och aldehydfritt desinfektionsmedel. för övriga ytor räcker det med en fuktad duk.
- Följ tillverkarens anvisningar angående dosering och inverkningstid för valt desinfektionsmedel.
- Torka med en väl med desinfektionsmedel indränkt duk och tillse att hela ytan väts ned.
- Använd skyddshandskar, för att skydda dig mot infektioner.
- Tillse att desinfektionsmedel inte tränger in i enheten.

8. Underhåll

Följ respektive fotvårdsmaskins bruksanvisning.

9. Miljö

För att försäkra Dig om ett miljövänligt bortskaffande, ta kontakt med Din lokala miljöstation. Kontaminerade enheter och instrument skall desinficeras före bortskaffande.

10. Service

För att kunna erbjuda snabb hjälp behöver vi typbeteckningen och serinumret på ditt bord. Uppgifterna finner du på typskylten på baksidan av bordet.

11. Reservdelar

Artikelnummer	Supinator/Radings artikelnummer	Artikel
701875103		Grenuttag med Till/frånslag
701506503	1925	Lamphållare Universal
701875006	10490	Handstyckshållare utan adapter
701875004	10491	Adapter till Triton/Luna/Saturn
701875005	10492	Adapter till Neptun/Sirius/Puck

12. Garanti

För Gerlach Fotvårdsbord erbjuder Eduard Gerlach GmbH en garanti om 12 månader från fakturadatum. Garantin innefattar inte förslitningsdelar och/eller delar som nöts genom naturlig användning. Skador som uppkommit på grund av olämpligt eller felaktigt användande faller inte heller under garantiåtagandet.

13. Ansvar

Eduard Gerlach GmbH tar inte på sig något som helst ansvar för skador eller personskador som uppstått för att bruksanvisningens anvisningar inte har följts.