

Bruksanvisning ***Gerlach Fotvårdsbord small***

Översättning av bruksanvisning i original
Utgiven 01/2022



Kära Kund

Vi gratulerar Dig till ditt köp av detta fotvårdsbord.

Du har härmed förvärvat ett högvärdigt arbetsredskap, som med rätt vård kommer att tjäna Dig under lång tid.

Fotvårdsbordet är, med rätt tillbehör, väl anpassat för de olika fotvårdsmaskinerna SATURN AT MICRO, LUNA AT MICRO, TRITON AT MICRO, TITAN med dammsug och med SIRIUS NT MICRO med vattenspray eller PUCK MICRO.

Vänligen läs instruktionerna noggrant innan Du använder fotvårdsbordet.

Tack för Ditt samarbete

Er

Eduard Gerlach GmbH, Bäckerstrasse 4-8, D-32312 Lübbecke

Tel. +495741/330-0, Fax +495741/347300

1. Tekniska data

Nätspänning	230 V
Ineffekt:	3600 W (max.)
Skyddsklass	I - BF
Mått (utan utbyggnader)	
Bredd x Djup x Höjd (mm)	495 x 490 x 760
Vikt:	35 kg

Eduard Gerlach GmbH förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning företa tekniska och optiska förändringar på sina produkter.

2. Leveransomfång

- 1 Gerlach fotvårdsbord SMALL
- 1 Bruksanvisning

3. Säkerhetsanvisningar

! Säkerhetsanvisningar i de enskilda kapitlen är utmärkta med denna symbol, och dessa skall ovillkorligen följas.

4. Systemtillhörighet

Fotvårdsbordet kan med fördel användas tillsammans med följande fotvårdsmaskiner.

- PUCK fotvårdsmaskin.
- SIRIUS NT MICRO fotvårdsmaskin med vattenspray.
- SATURN fotvårdsmaskin med dammsug.
- LUNA fotvårdsmaskin med dammsug.
- TRITON fotvårdsmaskin med dammsug.

5. Handhavande

- Anslut handstyckshållaren på vänster eller höger sida på enheten med de medföljande skruvarna i de förborrade hålen..
- Komplettera handstyckshållaren med handstycksadaptorn för vatten- eller sprayhandstycke genom att sätta i adaptorn ovanifrån. Säkra adaptorn med de medföljande skruvarna.

Nedan följer de nödvändiga stegen vid användning av fotvårdsmaskinerna SATURN AT MICRO, LUNA AT MICRO, TRITON AT MICRO, TITAN, SIRIUS NT MICRO och PUCK.

Optimal placering av fotvårdsmaskinen är på utdragsskivan.

- Ställ maskinen på utdragsskivan.
- Sätt i maskinens nätkontakt i grenuttaget på baksidan av bordet.

För att undvika skador på maskinens nätkabel är det viktigt att fixera kabeln.

Gå tillväga på följande sätt:

- Placera nätkabeln i kabelhållaren, som visas i figur 1 för att undvika fastklämning av nätkabeln i bordets utdragbara skiva. Du kan använda antingen vänster eller höger kabelklämma beroende på vald enhet och plats.
- Sätt i nätuttaget i maskinens eluttag.
- Slå på strömförsörjningen via strömbrytaren i grenuttaget.

Maskinen är nu strömförsörjd och enheten är klar att användas.

Vänligen beakta följande:

- ! Maximal ineffekt i grenuttaget är 3600 W.
- ! Av säkerhetsskäl skall inget ytterligare grenuttag anslutas till bordets grenuttag.
- ! Använd endast original reservdelar.
- ! Fotvårdsmaskinen som används, kan endast användas på ett säkert sätt om de till maskinen hörande tillbehören används. Handstycket måste därför fixeras i en säker hållare, så att det inte faller i golvet. Om andra än ovan nämnda fotvårdsmaskiner används påtar sig Eduard Gerlach GmbH inget ansvar. Detta gäller även för skador som uppkommit genom användande av olämpliga eller tillbehör som inte passar.



Fig. 1

6. Allmänna säkerhetsanvisningar

Fotvårdsbordet får endast ställas på ett horisontellt, jämnt underlag. Det finns en tipprisk om bordet ställs på sluttande ytor (5° - 10°). Tillse att de fyllda lådorna inte dras ut fullt ut samtidigt.

Följ den anslutna maskinens bruksanvisning för användning av denna.

7. Hygien

Bordets arbetsyta kan rengöras med ett alkohol- och aldehydfritt desinfektionsmedel. För övriga ytor räcker det med en fuktad duk.

Vänligen notera:

- ! Följ tillverkarens anvisningar angående dosering och inverkningsstid för desinfektionsmedlet
- ! Torka med en väl med desinfektionsmedel indränkt duk och tillse att hela ytan väts ned.
- ! Använd skyddshandskar, för att skydda dig mot infektioner.
- ! Tillse att desinfektionsmedel inte tränger in i enheten.

8. Underhåll

Följ respektive fotvårdsmaskins bruksanvisning.

9. Miljö

För att försäkra Dig om ett miljövänligt bortskaffande, ta kontakt med Din lokala miljöstation. Kontaminerade enheter och instrument skall desinficeras före bortskaffande.

10. Service

För att kunna erbjuda snabb hjälp behöver vi typbeteckningen och serinumret på ditt bord. Uppgifterna finner du på typskylten på baksidan av bordet.

11. Reservdelar/Tillbehör

Artikelnummer	Supinator/Radings artikelnummer	Artikel
701875102		Grenuttag med Till/frånslag
701506503	1925	Lamphållare Universal
701875006	10490	Handstyckshållare utan adapter
701875004	10491	Adapter till Triton/Luna/Saturn
701875005	10492	Adapter till Neptun/Sirius/Puck

12. Garanti

För Gerlach Fotvårdsbord erbjuder Eduard Gerlach GmbH en garanti om 12 månader från fakturadatum. Garantin innefattar inte förslitningsdelar och/eller delar som nöts genom naturlig användning. Skador som uppkommit på grund av olämpligt eller felaktigt användande faller inte heller under garantiåtagandet.

13. Ansvar

Varken Eduard Gerlach GmbH eller Supinator/Radings AB tar på sig något som helst ansvar för skador eller personskador som uppstått för att bruksanvisningens anvisningar inte har följts.

14. Montering av lupplampa

Lampan kan placeras på antingen höger eller vänster sida av bordet.

Montera lampfästet med de medföljande skruvarna i de förborrade hålen på sidan av bordet. Sätt i lampan och anslut lampkabeln till grenuttaget på baksidan av bordet.

Om lampan monteras på vänster sida av bordet och om den är försedd med en skruv på lamparmens bas måste skruven flyttas till andra sidan av lampans bas. Gör så här:

- Lossa skruven helt
- Dra ut skruven och stoppa i den från andra sidan av lampan.
- Dra fast skruven igen.