

# ***Bruksanvisning SW Dammsugsbord***

***Art.10555, 10556***



**VIKTIGT:**

Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda dammsugsbordet, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna och eventuella nationella säkerhetsföreskrifter. Använd inte bordet för något annat ändamål än vad som anges i bruksanvisningen.

Bruksanvisningen är en del av din leverans. Förvara den lätt tillgänglig. Om dammsugsbordet säljs vidare ska bruksanvisningen medfölja bordet. I den finns viktig information om säkerhet, användning och skötsel. På så vis skyddar du dig och undviker skador på dammsugaren.

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska modifikationer på bordet vid teknisk utveckling.

En bruksanvisning kan inte ta hänsyn till varje tänkbar användning. Kontakta din leverantör eller tillverkaren för ytterligare information eller vid problem som inte tagits upp alls eller otillräckligt i denna bruksanvisning.



BA10555 rev. 1 22-02-14

**Supinator/Radings AB**  
Box 54, 438 22 Landvetter  
Industrivägen 10, 438 92 Härryda



Tel. 0301-234070  
email: [info@suprad.se](mailto:info@suprad.se)  
Hemsida: [www.suprad.se](http://www.suprad.se)

## Innehåll

	Allmänt:	3
1.	Viktiga Säkerhetsföreskrifter:	3
1.1	Dammsugsbord	3
1.2	Dammsugare	3
1.3	Armatyr	4
1.4	Teknisk säkerhet	4
2.	Produktbeskrivning:	4
2.1	Försäkran om överensstämmelse	4
2.2	Leveransomfång	4
3.	Innan ibruktagande:	5
4.	Installation och användning:	5
4.1	Ansluta enheten till elnätet	5
4.2	Montering	5
4.3	Användning	6
5.	Rengöring	7
5.1	Rengöring	7
6.	Underhåll	7
6.1	Dammsugare	7
6.2	Armatyr	9
7.	Tekniska specifikationer:	10
8.	Problemlösning:	10
9.	Tillbehör och reservdelar	10
9.1	Tillbehör	10
9.2	Reservdelar	10
10.	Urbruktagande och hantering av avfall:	11
10.1	Hantering av förpackning	11
10.2	Hantering av dammpåsar och filter	11
10.3	Hantering av dammsugsbord	11
11.	Tillverkarens kontaktuppgifter:	11
12.	Försäkran om överensstämmelse	12

# Allmänt:

Kära Kund

Vi gratulerar Dig till ditt köp av detta instrumentbord med integrerad HEPA dammsugare och förstöringsarmatur.

Du har härmed förvärvat ett högvärdigt arbetsredskap, som med rätt vård kommer att tjäna Dig under lång tid.

Vid konstruktion av dammsugsbordet har särskild vikt lagts på de ergonomiskt optimala placeringarna för alla bordets olika delar, såväl som på den tidlösa designen.

Dammsugsbordet är, med rätt tillbehör, väl anpassat för de flesta olika fotvårdsmaskiner som är tillgängliga på den svenska marknaden.

## 1. Viktiga Säkerhetsföreskrifter:

Beakta förutom anvisningarna i denna bruksanvisning även landsspecifika säkerhetsföreskrifter.

### 1.1 Dammsugsbord

- Personer, som på grund av sina fysiska, sensoriska eller mentala förmågor eller på grund av oerfarenhet eller okunskap inte kan använda dammsugsbordet på ett säkert sätt, får endast använda det under uppsikt eller efter anvisning av en ansvarig person.
- Barn under åtta år bör hållas borta från dammsugsbordet. De får endast använda den under uppsikt. Barn från åtta år och uppåt får endast använda dammsugsbordet utan uppsikt under förutsättning att de känner till hur man använder det på ett säkert sätt. Barn måste kunna se och förstå riskerna med en felaktig användning. Barn får inte rengöra eller göra underhåll på dammsugsbordet utan uppsikt. Håll uppsikt över barn som befinner sig i närheten av bordet. Låt inga barn leka med det.
- Under den lagstadgade reklamationsfristen får reparationer endast utföras av Supinator/Radings eller av oss auktoriserad serviceverkstad, annars kan garantibestämmelserna inte åberopas om det skulle uppstå fel på dammsugsbordet vid senare tillfälle. Reparation av bordets ingående komponenter får endast utföras av Supinator/Radings eller av oss auktoriserad serviceverkstad. Ej fackmässigt utförda reparationer kan medföra avsevärda risker för användaren.
- Dammsugsbordet får endast användas i slutna rum, och endast på en nivå under 4000 m över havet.
- För att skilja bordet från elnätet måste stickkontakten dras ut från vägguttaget.

### 1.2 Dammsugare

- Dammsug endast torrt damm/torr smuts med dammsugaren. Dammsugaren får inte användas på människor och djur. Alla andra användningsområden samt ombyggnader och ändringar av dammsugarens konstruktion är inte tillåtna.
- Dammsug aldrig glödande föremål som till exempel cigaretter, aska eller kol. Dammsug inte vätskor eller annan fuktig smuts. Låt våta eller schamponerade mattor torka helt innan du dammsuger dem.
- Dammsug inte tonerpulver. Tonerpulver som används i exempelvis skrivare eller kopiatorer kan leda ström.
- Dammsug aldrig lättantändligt eller explosivt material eller gaser. Dammsug inte heller på platser där sådana ämnen finns.
- Stäng alltid av dammsugaren efter dammsugning och innan du rengör eller underhåller den. Dra ut stickproppen ur vägguttaget. Dra inte ut stickproppen ur vägguttaget med hjälp av kabeln. Dra inte anslutningskabeln över vassa kanter eller kläm den, till exempel under dörrar. Undvik att köra över anslutningskabeln med bordet. Anslutningskabeln, stickproppen och vägguttaget kan skadas och därmed utgöra en säkerhetsfara.
- Använd inte den integrerade dammsugaren om anslutningskabeln är skadad. Byt ut en skadad anslutningskabel mot en kabel komplett med kabeltrumma. Av säkerhetsskäl får bytet endast utföras av Supinator/Radings eller av oss auktoriserad serviceverkstad.
- Använd inte dammsugaren utan damppåse, utblåsnings- och motorfilter. Om det inte finns någon damppåse i dammsugaren kan locket till dammutrymmet inte stängas. Försök inte att stänga locket med våld.
- Undvik att komma nära ansiktet med munstycken och dammsugarrör under dammsugning.
- Använd bara damppåsar, filter och tillbehör med Original Miele-logo. Endast på så vis kan tillverkaren garantera säkerheten.
- Miele eller Supinator/Radings ansvarar inte för skador som har uppstått på grund av att dammsugaren har använts på annat sätt än den är avsedd för, om den har använts på ett felaktigt sätt och/eller att säkerhetsanvisningarna och varningarna inte har följts.
- Doppa aldrig dammsugaren i vatten. Rengör den endast med en torr eller lätt fuktig trasa.

### 1.3 Armatur

- Supinator/Radings är bara ansvarig för armaturen när installation, underhåll, reparationer eller ändringar utförs av oss eller av personal som är kvalificerade för sådant arbete.
- Om armaturens yttre flexibla anslutningsledning är skadad, får den endast bytas ut av tillverkaren eller en kvalificerad tekniker för att minska risken för skador. Reparationer av armen måste utföras av Supinator/Radings eller av oss auktoriserad personal.
- Produkten innehåller förspända fjädrar som kan skada människor och/eller egendom under service, om den utförs fel.
- Denna produkt har en fjäderbelastad arm. Se därför till att monteringen sker enligt rekommendationerna i montageanvisningen.
- Att applicera en belastning utöver vad den fjäderbalanserade armen är avsedd för, kan skada armens funktion och produktens funktionalitet. Därför bör man undvika sådana påfrestningar. Produkter som fått skador som innebär minskad funktionalitet, skall tas ur bruk tills skadan är reparerad.
- Glaset på förstöringsarmaturen kan om det utsätts för starkt direkt solljus vara upphov till till oönskad koncentrerad värme. Produkten ska därför inte placeras i direkt solljus utan solskydd.

### 1.4 Teknisk säkerhet

- Kontrollera att dammsugsbordet inte har några synliga yttre skador och ta inte ett skadat bord i bruk.
- Jämför anslutningsuppgifterna (nätspänning och frekvens) på dammsugarens och lampans typskylt med dem som gäller för elnätet. Dessa data måste överensstämma.
- För att skilja bordet från elnätet måste stickkontakten dras ut från vägguttaget.
- Dammsugsbordet måste kopplas till ett uttag med skyddsjord.

## 2. Produktbeskrivning:

- SW Dammsugsbord 10555 och 10556 är instrumentbord med integrerad dammsugare och förstöringsarmatur. Bordet är försett med 2 låga lådor och en hög som glider i skenor. Dessutom finns en öppen förvaring mellan lådsektionen och dammsugsutrymmet.
- Bordet är tillverkat av högtryckslaminat samt ljudisolerat.
- Den integrerade hepadammsugaren är av märket Miele.
- Lamparmen är av lackerad metall
- Lamphuvudet är försedd med LED belysning ( 11W)

### 2.1 Försäkran om överensstämmelse

Detta SW dammsugsbord 10555 och 10556 uppfyller kriterierna för CE märkning. Försäkran om överensstämmelse kan beställas från tillverkaren.

### 2.2 Leveransomfång

- 1 Instrumentbord med lampfäste
  - 1 Dammsugare med tillhörande slang och dammsugspåse märkt G/N
  - 1 extra dammsugspåse märkt G/N
  - 1 Grenkontakt
  - 1 Lampa med förstöringsglas och slang/slangar för utsug
  - 1 Fotpedal för till/frånslag
  - 1 Bruksanvisning
- För dammsugsbord 10556 tillkommer även 1 tunn siliconslang med dammsugshylsa för handstycke i leveransomfånget

### 3. Innan ibruktage:

Förpackning	Spara förpackningen eller släng den i enlighet med relevanta föreskrifter. Du kan också återsända emballaget till tillverkaren (på din bekostnad).
Transportskador	Kontrollera så att ditt dammsugsbord och ingående komponenter inte fått transportskador före ibruktage. Om synlig skada uppstått, koppla inte in enheten till elnätet. Kontakta din leverantör och transportören.
Placering	Ställ enheten på en torr och stabil plats. Se till att utrymmet runt enheten är tillräckligt ventilerad. Risk för elchock på grund av fukt i enheten. Skydda enheten mot inträngande fukt. Se till att enheten och arbetsområdet är torrt för att förebygga elolyckor och skador på enheten.



Fara

### 4. Installation och användning:

#### 4.1 Ansluta enheten till elnätet

Elnätsförhållanden	Jordat uttag 220-240VAC, 50Hz Strömförsörjningen ska skyddas av en jordfelsbrytare.
Koppla in nätkabel	Använd kontakten som levereras med enheten. Sätt i kontakten i ett lätt tillgängligt vägguttag så att du lätt kan skilja enheten från elnätet.

#### 4.2 Montering bord 10556

- Sätt i lampan i lampfästet.
- För att erhålla en viss tröghet i armaturens vridbarhet kan man justera denna genom att efterdra mässingsskruven som sitter på lampfästet.
- Sätt in lampans slanganslutning i dammsugsslangen på sidan av bordet.




Slanganslutning  
dammsugare/  
lampa



Slanganslutning  
handstycke/  
dammsugare



Slanganslutning  
handstycke/  
dammsugare

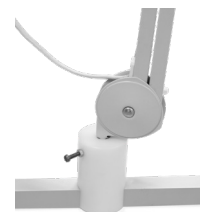

Lampfäste med justeringskruv

- Anslut den tunna siliconslangens dammsugshylsa till ditt handstycke.
- För att förhindra skador på material eller personer under installation av en produkt med en fjäderbelastad arm – montera först på dammsugsbordet. Placera produkten i fästet, ta bort skyddsplasten eller gummibanden, och fäll ut produkten försiktigt.
- En lamparm ska monteras så att den är lätt att använda, utan att vålla leder eller andra konstruktionsdetaljer onormala påfrestningar. Begränsad kraft krävs för att flytta en fjäderbalanserad arm.

### 4.3 Montering bord 10555

- Sätt i lampan i lampfästet.
- För att erhålla en viss tröghet i armaturens vridbarhet kan man justera denna genom att efterdra mässingsskruven som sitter på lampfästet.
- Sätt in lampans slanganslutning i dammsugsslangen på sidan av bordet.



Slanganslutning dammsugare/lampa



Lampfäste med justeringsskruv


- För att förhindra skador på material eller personer under installation av en produkt med en fjäderbelastad arm – montera först på dammsugsbordet. Placera produkten i fästet, ta bort skyddsplasten eller gummibanden, och fäll ut produkten försiktigt.
- En lamparm ska monteras så att den är lätt att använda, utan att vålla leder eller andra konstruktionsdetaljer onormala påfrestningar. Begränsad kraft krävs för att flytta en fjäderbalanserad arm.

### 4.4 Användning


- Tryck på fotpedalen för att sätta på eller stänga av dammsugaren. Normalt behöver du inte använda startknappen på dammsugaren, då du istället styr dammsugaren med hjälp av bordets till/frånslag. Startknappen är aktiverad redan vid leveransen.
- Du kan anpassa dammsugarens sugeffekt. Effektlägena är försedda med symboler vilka visar exempel på vad som är lämpligt att dammsuga med respektive effektläge. Vi rekommenderar effektläge min eller steg 2.



Till/frånslag dammsugare

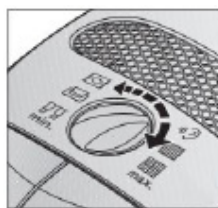

Vred för sugeffekt

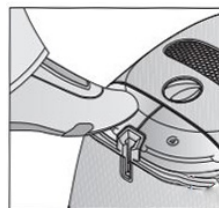

Startknapp för dammsugare

- Lampan ska monteras så att normal användning ligger innanför produktens tänkta användningsområde, och att rörelsebegränsningarna ej belastas i onödan. Undvik att använda armen så att rören går emot varandra och/eller att armrörelsen går mot ändlägena. Sådana rörelser kan orsaka brottanvisningar som kan leda till skada för användare och personer i produktens närhet
- För lampans olika delar, se bild nedan



- Sätt på lampan med strömbrytaren. För att dimma ljuset, håll strömbrytaren intryckt tills rätt ljusstyrka uppnåtts
- Lampan är försedd med två halvcirkelformade LED moduler. Modulerna är dimbara, och stänger av sig själva automatiskt efter 4 eller 9 timmar för att spara energi.
- Ställ in lampan i rätt position i förhållande till arbetsområdet.

## 5. Rengöring

### 5.1 Rengöring

- Dammsugsbordet och dess ingående komponenter kan rengöras med ett rengöringsmedel med ett neutralt pH-värde (pH 7). Blanda rengöringsmedlet med ljummet vatten. Applicera sedan blandningen med en lätt fuktig trasa. Därefter bör tvålrester tas bort med en mjuk ren duk fuktad med vatten.
- Regelbunden rengöring av armaturer är avgörande för optimal belysning. Armaturer rengörs i ett strömlöst tillstånd. Elektriska komponenter och anslutningar bör inte utsättas för vatten eller fukt. Tänk på att LED-armaturer är känsliga för elektrostatisk urladdning (ESD).
- Spruta inte rengöringsmedel direkt på armaturen
- Rengöringsmedel baserade på organiska lösningsmedel och starkt alkaliska rengöringsmedel samt ammoniakbaserade rengöringsprodukter måste undvikas, eftersom de kan skada komponenter på både kort och lång sikt. Detta gäller särskilt komponenter tillverkade av olika plastmaterial.

## 6. Underhåll

### 6.1 Dammsugare

Stäng alltid av dammsugaren och dra ut stickproppen före skötsel av den.

Mieles filtersystem består av tre komponenter:

- dammpåse
- motorfilter
- HEPAfilter

För att dammsugaren ska fungera felfritt måste du byta ut dessa filter med jämna mellanrum.

Använd endast Mieles originaldampmpåsar, filter och tillbehör med "Original Miele"-logo. Endast då kan dammsugarens sugeffekt utnyttjas optimalt och bästa möjliga rengöringsresultat uppnås.

Om du dammsuger väldigt fint damm täpps porerna i dammpåsen till mycket snabbare. Dammindikatorn visar då "full" dammpåse trots att den egentligen inte är det. Vi rekommenderar att du byter dammsugspåse ungefär var tredje till fjärde vecka vid heltidsanvändning.

Använd Mieles originaldampmpåsar med röd eller blå fästplatta av typ F/J/M/GN Hyclean (artikelnummer 1161). Mieles originalfilter känner du igen på "Original Miele"- logon på förpackningen eller direkt på dammpåsen.

I alla förpackningar med Mieles dammpåsar ligger även ett utblåsningsfilter av typen AirClean och ett motorfilter. För att säkerställa en god luftkvalitet rekommenderar vi att du, istället för AirClean filtret, använder HEPAfilter (artikelnummer 1166)


Dampmpåsar är engångsartiklar. Kasta använda dammpåsar. Använd inte samma dammpåse flera gånger. Igentäppta porer i dammpåsen reducerar dammsugarens sugeffekt.

Att använda dammpåsar av papp eller pappersliknande material och dammpåsar med en fästplatta av papp kan orsaka svåra skador på dammsugaren. Detta för också med sig en förlust av garantin liksom all användning av andra dammpåsar utan "Original Miele"- logo.


Mieles originaldampmpåsar och originalfilter finns att köpa hos din återförsäljare, hos vårt reservdelslager och via vår webbshop på <http://shop.suprad.se/sv/shop.asp>

#### 6.1.1. Byte av dammsugspåse


- Öppna luckan på baksidan av bordet och ta ut dammsugaren.
- Koppla loss dammsugarens anslutnings slang från dammsugaren.
- Dra låsknappen uppåt och fäll upp locket till dammutrymmet tills det snäpper till.
- Dammpåsens hygienlucka stängs automatiskt så att inget damm kan komma ut.
- Ta ut dammpåsen ur hållaren genom att fatta tag i greppet.
- Sätt i den nya dammpåsen i hållaren tills det tar stopp. Låt dammpåsen vara ihopvikt som den är i förpackningen när du sätter fast den i hållaren.
- Veckla sedan ut dammpåsen så mycket som möjligt i dammutrymmet.
- Stäng locket till dammutrymmet. Se till att det snäpper fast och att dammpåsen inte kläms.
- En spärr förhindrar att locket till dammutrymmet stängs om det inte finns någon dammpåse i. Tryck inte ner locket med våld!
- Ställ in dammsugaren i bordet igen och koppla ihop dammsugarens anslutnings slang till dammsugaren.

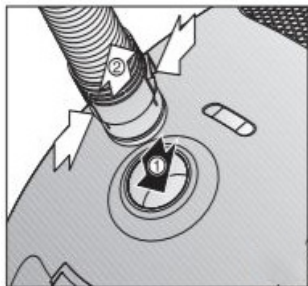

Anslutnings slang

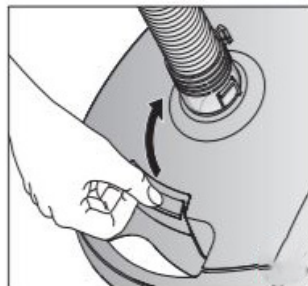

Låsknapp

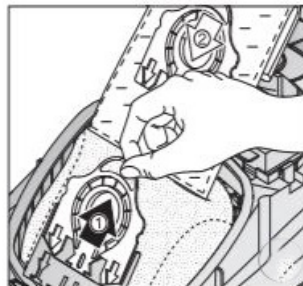


Påsbyte



### 6.1.2. Byte av motorfilter

Byt alltid motorfilter när du öppnar en ny förpackning Miele's originaldampåsar. I alla nya förpackningar med Miele's dammpåsar ligger även ett motorfilter.

- Öppna luckan på baksidan av bordet och ta ut dammsugaren.
- Koppla loss dammsugarens anslutnings slang från dammsugaren
- Öppna locket till dammutrymmet.
- Fäll upp filterramen och byt motorfilter.
- Fäll ner filterramen.
- Stäng locket till dammutrymmet.
- Ställ in dammsugaren i bordet igen och koppla ihop dammsugarens anslutnings slang till dammsugaren.

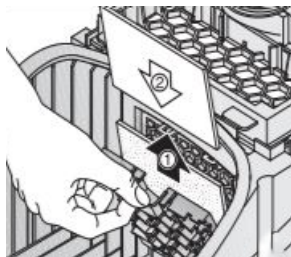


Filterram/Motorfilter

### 6.1.3. Byte av HEPAfilter

Din dammsugare är som standard utrustad med ett HEPA AirClean HA30 filter. Byt Hepafiltret när indikeringen för byte är helt röd (se bild). Efter cirka 50 driftstimmar visas indikeringen. Du kan fortsätta dammsuga, men tänk på att sugeffekten inte längre är lika bra. Vi rekommenderar att HEPA filtret byts ungefär 4 gånger/år

- Öppna luckan på baksidan av bordet och ta ut dammsugaren.
- Koppla loss dammsugarens anslutnings slang från dammsugaren
- Öppna locket till dammutrymmet.
- Lyft upp HEPA filtret och ta ut det.
- Sätt i det nya HEPA filtret och tryck det neråt. .
- Tryck på pilen på filterindikatorn (se bild), efter 10-15 sekunder visas en smal röd färgremsa på displayens vänstra sida. (se bild)
- Stäng locket till dammutrymmet.
- Ställ in dammsugaren i bordet igen och koppla ihop dammsugarens anslutnings slang till dammsugaren.


Om du vill köpa ett Miele original-HEPA filter separat så glöm inte att uppge dammsugarmodell vid köp så att du får rätt filter. Du kan också beställa dessa enkelt och bekvämt via vår webbshop på <http://shop.suprad.se/sv/shop.asp>.

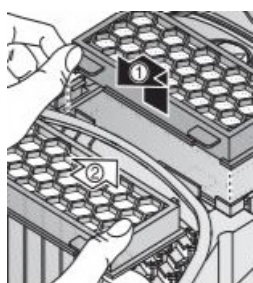

Hepafilter



Indikering

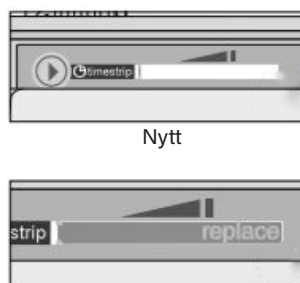

Bytes

## 6.2 Armatur

- Livslängden på drivare/don påverkas av temperaturen och kvaliteten på matningsspänningen. Normalt felutfall av komponenterna är 0,2% per 1000 timmar vid armaturens högsta tillåtna omgivningstemperatur. Transienter och spikar, samt anslutning till dåliga provisoriska generatorer, kan drastiskt minska livslängden.
- LED-armaturer har en tolerans på +/-10% för ljusflödet ut ur armaturen. Precis som för konventionella ljuskällor har LED ljuskällan en nedgång i ljusflöde under sin livslängd. När man byter ut en LED-armatur mot en ny, kan man eventuellt se en skillnad i ljusflöde jämfört med en gammal armatur. Detta är en konsekvens av tekniska förändringar och ökat ljusflöde, nya LED-armaturer kan ha en lätt förändring i ljuskvaliteten jämfört med de gamla.
- Som för konventionella ljuskällor kan man upptäcka variationer i färgtemperaturen mellan armaturer monterade tätt tillsammans (kluster). Färgtoleransen för LED ljuskällor är normalt bättre eller lika som för konventionella ljuskällor.
- Ljuskällor i slutet av sin livslängd kan producera värme över den förväntade nivån. Detta kan skada komponenter i armaturerna.

## 7. Tekniska specifikationer:

Nätspänning:	220-240-V		
Energiförbrukning totalt (W)	805	Mått bord	H: 70 cm B: 61 cm, D: 41 cm
Vikt totalt	ca: 45 kg	Mått hög låda	H: 18,5 cm B: 17,5 cm D: 34 cm
LED lampa	11W	Mått låga lådor	H: 8 cm B: 38cm D: 34 cm
Lumen ut	900		
Färgtemperatur	4000K	Material bord:	Högtryckslaminat
Färgåtergivning	CRI>80	CE-direktiv 2014/35/EU	Ja
Skyddsklass	IP20		
Nätfrekvens:	50		

## 8. Problemlösning:

Fel	trolig orsak	Åtgärd	Lösning
Dammsugare stänger av sig själv	En termostat stänger av dammsugaren när den blir för varm. Störningar kan uppstå vid stopp i dammsugarröret, när dammpåsen är full eller dammpåsens porer är igentäppta av fint damm. Orsaken kan även vara ett mycket smutsigt motorfilter eller utblåsningsfilter. Stäng av dammsugaren direkt (tryck på fotknappen Till/Från ) och dra ut stickproppen ur vägguttaget	Avlägsna stopp i rör och slangar, kontrollera att dammsugspåsen inte är full eller igentäppt	När orsaken är åtgärdad och dammsugaren har varit avstängd i cirka 20–30 minuter har den svalnat så pass mycket att den kan användas igen.
Lampan lyser inte	Nätkontakten sitter inte i		Sätt i nätkontakten
Dammsugaren startar ej	Kontakten är inte rätt ansluten i grenuttaget		Anslut kontakten i grenuttaget
	Till/frånslaget är inte rätt anslutet i grenuttaget		Anslut till/frånslaget i grenuttaget
	Grenuttaget är inte inkopplat till elnätet		Sätt i grenuttagets stickkontakt i väggkontakten.
	Dammsugarens strömbrytare är inte tillslagen		Tryck på dammsugarens startknapp

## 9. Tillbehör och reservdelar

### 9.1 Tillbehör

Artikelnummer	Benämning
1161	Damppåse
1166	HEPA filter

### 9.2 Reservdelar

Artikelnummer	Benämning
1920	Lampfäste
V11004	Siliconslang
90426	Dammsugshylsa

## 10. Urbruktagande och hantering av avfall:

### 10.1 Hantering av förpackning

Förpackningen/embalaget skyddar dammsugaren mot transportskador. Förpackningsmaterialen är valda med hänsyn till miljön och är därför återvinningsbara.

Förpackning/embalage som återförs till materialkretsloppet innebär minskad råvaruförbrukning och mindre mängder avfall.

### 10.2 Hantering av dammpåsar och filter

Damppåsar och filtren är tillverkade av miljövänligt material. Filtren kan du kasta i hushållssoporna. Du kan även kasta dammpåsar i hushållssoporna så länge de inte innehåller något som inte får kastas i dessa.

### 10.3 Hantering av dammsugsbord

Ta ut dammpåse och filter och kasta dem i hushållssoporna innan du gör dig av med dammsugaren.

Elektriska och elektroniska produkter som har tjänat ut består av material som kan återanvändas. De innehåller dock även skadligt material som är nödvändigt för deras funktion och säkerhet. Om detta slängs i hushållsavfallet eller hanteras på fel sätt kan det leda till hälsorisker och skador på miljön. Kasta därför på inga villkor den uttjänade dammsugaren i hushållsavfallet.

Lämna istället in uttjänade elektriska och elektroniska produkter till en återvinningsstation.

Se till att den uttjänade dammsugaren förvaras barnsäkert tills den lämnas in för omhändertagande.

Dammsugsbordet omfattas av direktivet 2012/19/EU (direktiv om insamling och återvinning av elektriska och elektroniska produkter) och skall vid slutet av sin livslängd alltid samlas in och levereras till återvinningsstation i din kommun eller region

## 11. Tillverkarens kontaktuppgifter:

Supinator/Radings AB  
Box 54  
438 22 Landvetter, SVERIGE  
Telefon +46(0)30131515  
info@suprad.se  
www.suprad.se

Har du några frågor eller förslag avseende enheten, dess funktioner eller bruksanvisningen? Kontakta oss vi hjälper dig gärna.

## 12. Försäkran om överensstämmelse

CE Declaration of Conformity

We hereby declare that the product is CE-marked under our sole responsibility and that the below mentioned product is conforming to the requirements outlined in the EU directives mentioned below

Tillverkare/Manufacturer: Supinator/Radings AB

Adress/Address: Box 54  
438 22 LANDVETTER

Land/Country Sverige/Sweden

Produkt: Dammsugsbord/Instrumenttable with suctionunit

Artikelnummer/Item number 10555 and 10556

Applicerade direktiv/Applied directives:

2014/35/EU Lågspänningsdirektivet/Low-Voltage Directive

2011/65/EU Direktivet om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning/RoHS Directive

2012/19/EU Direktivet om avfall som utgörs av eller innehåller elektrisk och elektronisk utrustning/WEEE Directive

Applicerade harmoniserade standards/Applied harmonised standards:

SS-EN 60335-1:2012 + A11:2014 + AC1:2014

SS-EN 60335-2-2:2010 + A11:2012 + A1:2013

Landvetter 2020-02-04



Lena Carlsson  
Företagsledare