

Bruksanvisning Fotpedal 1100



VIKTIGT:

Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda fotpedalen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna och eventuella nationella säkerhetsföreskrifter. Använd inte pedalen för något annat ändamål än vad som anges i bruksanvisningen.



FB-04-133, Rev. 6, Senaste ändring 22.11.22

Supinator/Radings AB
Box 54, 438 22 Landvetter
Industrivägen 10, 438 92 Härryda



Tel. 0301-234070
email: info@suprad.se
Hemsida: www.suprad.se

1. Avsett ändamål:

Fotpedalen är avsedd att styra slipmaskiner från Hadewe - Slipmaskiner för fotvård, nagelvård och dentalteknik.

2. Kompatibilitet med enheter:

Läs bruksanvisningen för din maskin för att se om den är kompatibel med fotpedalen. Använd inte pedalen till enheter som inte är kompatibla.

3. Anslutning av fotpedalen:

Stäng av slipmaskinen på huvudströmbrytaren. Sätt i fotpedalens kontakt i det för ändamålet avsedda uttaget på slipmaskinen. Referera till slipmaskinens bruksanvisning för att utröna var uttaget till fotpedalen finns. Placera fotpedalen på golvet och säkerställ att ingen snubbelrisk föreligger. Se också till att fotpedalen är placerad så att ingen risk för vattenspill föreligger (alltså inte i omedelbar närhet till fotbadet).

4. Funktioner:

Referera till din slipmaskins bruksanvisning för uppgifter om fotpedalens funktioner.

5. Säkerhetsanvisningar:

När kontakten till fotpedalen dras ut kan handstycket börja rotera. Dra därför endast ur fotpedalens kontakt när slipmaskinen är avstängd på huvudströmbrytaren. Fotpedalen utgör ingen ersättning för huvudströmbrytaren. Vid arbetets slut, stäng alltid av slipmaskinen med huvudströmbrytaren.

På vissa slipmaskiner kan varvtalet ställas in med fotpedalen. Se därför till att endast arbeta med roterande instrument som är tillåtna för slipmaskinens maximala varvtal. . Håll fotpedalen borta från vätskor. Om vätska har spillts över fotpedalen, skall denna tas ur bruk och skickas till service för att kontrollera fotpedalens funktionalitet.

6. Underhåll:

Vi rekommenderar en årlig kontroll av ställdonen för frigång.

7. Rengöring:

För att ta bort smuts från fotpedalen, använd en med vatten lätt befuktad pappershandduk. Alla ytor på fotpedalen kan avtorkas med desinfektionsservetter. Under fotpedalens livstid kan den utan inskränkning rengöras och desinficeras.

8. Tekniska specifikationer:

Mått B x H x D:	7 x 3 x 10 cm
Kabellängd:	2,85 m
Vikt:	180g
Spänning:	Max 10V
Ström:	max. 0,3 A
Temperaturomfång:	Lagring/transport -5°C till +55°C Drift +10°C till +40°C
Relativ luftfuktighet:	Lagring/transport 10%-95% Drift 25% - 75%
Lufttryck:	Lagring/transport 500hPa till 1060 hPa Drift 700hPa - 1060 hPa
Skyddsklass:	IP34

