

Bruksanvisning Autoklav Prestige T-Class

Översättning av bruksanvisning i original



VIKTIGT:

Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda maskinen, beakta särskilt säkerhetsföreskrifterna. Förvara bruksanvisningen på en säker och lättillgänglig plats.

Tillägg till bruksanvisning i original:

Ägaren och huvudoperatören är ansvariga för att alla användare erhållit instruktioner för korrekt användning av maskinen, och att de tagit del av skydds- och säkerhetsföreskrifterna. Denna bruksanvisning skall anses vara en del av maskinen och bör förvaras i anslutning till maskinen, så att alla som skall använda maskinen kan ta del av innehållet.



Prestige Autoklav

Supinator/Radings AB
Box 54, 438 22 Landvetter
Industrivägen 10, 438 92 Härryda



Tel. 0301-234070
email: info@suprad.se
Hemsida: www.suprad.se

Innehållsförteckning	
Sektion 1: Introduktion	3
Sektion 2: Symboler, Displayer, Reglage:	3
Sektion 3: Komma igång	5
1. Vatten	5
2. Laddning	5
3. Stängning	5
4. Anslutning	6
5. Start	6
6. Trycksänkning	6
7. Upplåsning	7
8. Urplockning	7
9. Verifiering av steriliseringscykel	7
10. Anslutning av skrivare (Podioclave 210052 och Media (Endast 210048)	8
Sektion 4: Fortsatt handhavande	8
Sektion 5: Daglig vård och underhåll	9
Sektion 6: Felsökning	10
Sektion 7: Tekniska specifikationer	12
Sektion 8: Ytterligare information	14

Sektion 1: Introduktion

Vi tackar för det förtroende ni visat genom att välja T-Classic autoklav, konstruerad för att sterilisera massiva ej inslagna instrument.

Vid uppackning, var vänlig kontrollera om transportskador inträffat. Om så är fallet, kontakta omedelbart er leverantör.

Tillsammans med denna enhet levereras följande:

- Nätsladd
- Certifikat angående prestandatest
- 2 reservsäkringar (gäller endast 230V enheter)
- Efterlevandecertifikat (gäller endast 230V enheter)

Notera: Denna manual är applicerbar på alla T-Classic modeller som säljs i Europa

Avsett ändamål/avsedd användning

Autoklaven är avsedd för sterilisering av massiva och ej inslagna medicinska och kirurgiska instrument, samt media som används i utbildning, hår- och skönhetsvård, fotvård och laboratorier. Enheten är inte avsedd att användas i medicinska eller dentala sammanhang.

Den avsedda användningen av T-Classic modellerna är att sterilisera massiva och ej inslagna samt media. Steriliseringsprocessen som T-Classic modellerna använder för att sterilisera föremål är ånga under hög temperatur och högt tryck.


Inga speciella lokaler, utbildningar eller kvalifikationer behövs hos användaren av enheten. Produkten kräver endast grundläggande kunskap om användningen som ges av återförsäljaren.

Sektion 2: Symboler, Displayer, Reglage:

T-Classic One (210001) och T-Classic Podialave (210052)

Reglage:


- | | |
|---|--|
| A | Trycksänkkningsventil |
| B | Startknapp arbetscykel |
| C | Tryckstegringsindikator |
| D | Displaypanel |
| E | Handtag lock (rör inte handtaget direkt efter steriliseringscykeln, då det kan vara hett). |
| F | Ångkanal ARNING HET YTA! Får ej övertäckas |

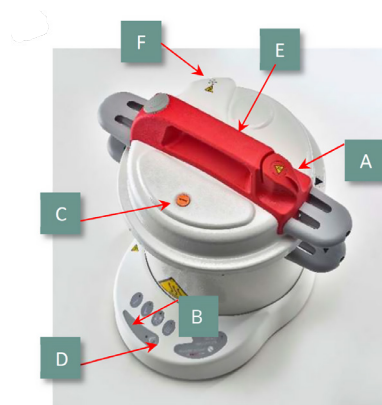

T-Classic Plus (210004)

Reglage:


- | | |
|---|--|
| A | Trycksänkkningsventil |
| B | Tryckmätare |
| C | Tryckstegringsindikator |
| D | Temperaturmätare |
| E | Kontrollpanel |
| F | Handtag lock (rör inte handtaget direkt efter steriliseringscykeln, då det kan vara hett). |
| G | Ångkanal ARNING HET YTA! Får ej övertäckas |
| H | Startknapp arbetscykel |

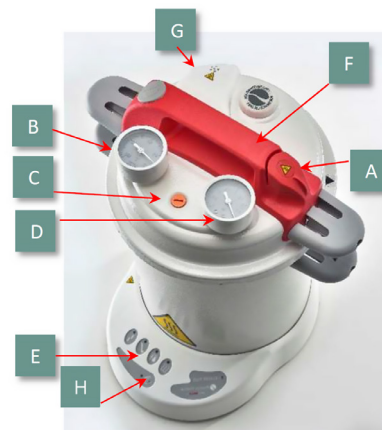

T-Classic Media (210048)

Reglage:


- A Trycksänkingsventil
- B Startknapp arbetscykel
- C Tryckstegringsindikator
- D Displaypanel
- E Handtag lock (rör inte handtaget direkt efter steriliseringscykeln, då det kan vara hett).
- F Ångkanal **VARNING HET YTA! Får ej övertäckas**
- G Spärrmekanism

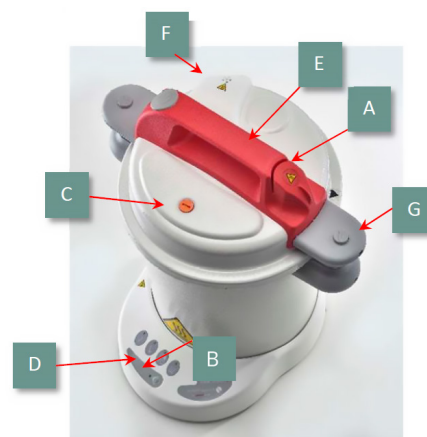

Alla modeller

Indikeringslampor:

- L1 "Ström på" -GRÖN
- L2 Uppvärmning -ORANGE
- L3 Sterilisering (enheten har uppnått rätt temperatur) -GUL
- L4 Sterilisering avslutad - GRÖN
- L5 Felindikator - RÖD

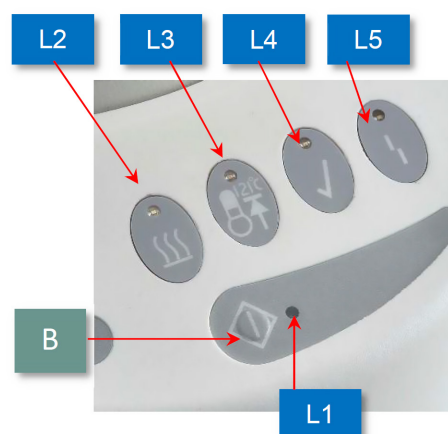

Varningssymboler:

- W1 Se upp för strömstöt
- W2 Varning! Läs handboken innan autoklaven används
- W3 Varning! Enheten måste vara ansluten till jordat uttag
- W4 Varning! Risk för brännskada



VARNING!

Rör inte behållaren eller locket när autoklaven är i drift, då dessa delar är bli heta.

VARNING!

Enheten måste vara ansluten till JORDAT UTTAG. Strömsladdens kontakt skall alltid vara lätt tillgänglig, så att enheten enkelt kan kopplas från elnätet.

VIKTIGT!

Prestige Medical rekommenderar dig att lämna in enheten för service och kalibrering hos en kvalificerad servicetekniker varje år.

Sektion 3: Komma igång

Innan autoklaven används för första gången, ta dig tid att läsa igenom följande sidor så att du bekantar dig med användningen av enheten. Vi rekommenderar att alla som använder autoklaven är utbildade avseende funktionerna och driften av den.

Autoklaven är enkel att använda. Genom att följa de enkla stegen i bruksanvisningen tillsammans med bilderna på autoklaven, reglagen, instrumentpanelen och symbolerna (sidan 4) kan du försäkra dig om att instrumenten blir korrekt steriliserade varje gång.

1. Vatten

Fyll enheten till nivåmärket på kammarens insida med ca: 0,75 liter destillerat eller avjoniserat vatten.

WARNING: Använd inte kranvatten och överfyll inte enheten. Kontrollera vattennivå efter varje cykel.

2. Laddning

Placera ENDAST TVÄTTADE instrument samt en TST-remsa i instrumentkorgen eller kassetterna och lägg på plats i enheten. TST-remsorna ska placeras så nära mitten av instrumenten som möjligt. För T-Classic media modellen, placera endast media och en TST-remsa i instrumentkorgen och placera i enheten. Notera: T-Classic Media modellen är inte avsedd för sterilisering av instrument. Se sektion 7 - Tekniska specifikationer avseende lastning

3. Stängning


Placera alltid locket på autoklaven med trycksänkingsventilen (A) öppen.

Passa ihop locket och huset (F3) och vrid medurs (F1) så att locket stängs helt (F2), följ pilarna.

Stäng trycksänkingsventilen (A) så att den är i linje med handtaget på locket.

Lämna aldrig autoklaven i den position som visas i F1

Notera: För att öppna spärrmekanismen på T-Classic media modellen, måste knappen tryckas ner samtidigt som locket vrids. Alla andra modeller öppnas och stängs på samma sätt utan att trycka på några knappar.

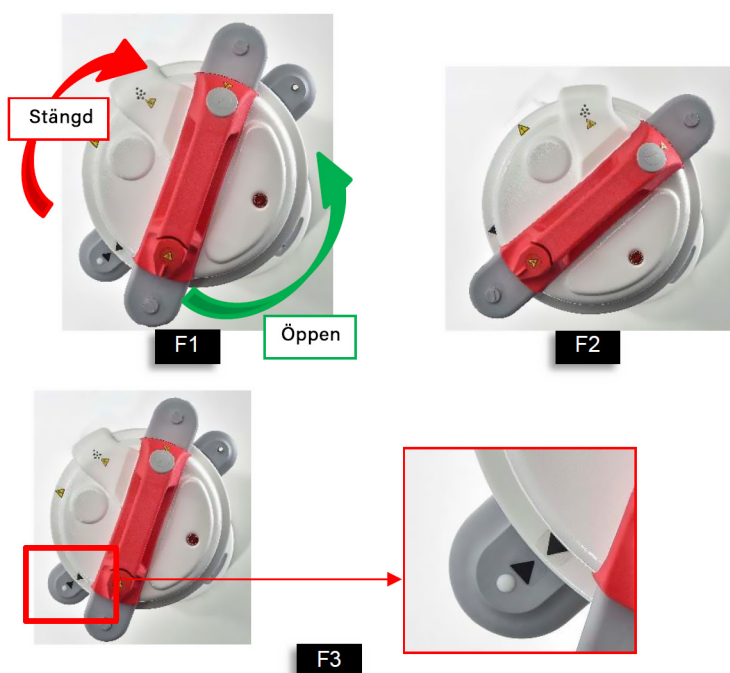

4. Anslutning

Stick in kontakten på sladden på enhetens baksida till ett jordat uttag med korrekt spänning. Lampa L1 lyser nu grönt. Om den istället blinkar kontinuerligt, föreligger ett fel och du bör boka ett teknikerbesök.

5. Start

Starta steriliseringscykeln genom att trycka på knappen (B).

Lampa L1 lyser grönt och
L2 lyser orange.

I takt med att temperaturen stiger ersätts luft med ånga genom att luften strömmar ur evakueringsventilen i locket tills den stängs med ett hörbart "klick" vilket förseglar enheten.

Tryckindikatorn (C) stiger vilket anger att enheten är trycksatt.

Steriliseringstemperaturen är uppnådd när:


Lampa L1 lyser grönt,
L2 blinkar orange och
L3 lyser gult.

Steriliseringsprocessen är fullbordad när:

Lampa L1 lyser grönt och när lampa
L4 lyser grönt.

Notera: L4 fortsätter att lysa grönt till en ny cykel startas eller enheten kopplas från elnätet.

Om du försöker starta en ny cykel när **både** L4 (cykel klar) och L5 (fellampan) lyser, så betyder detta att enheten är för varm för att en cykel ska kunna startas. Vänta tills dessa två inte längre lyser, för att kunna starta cykeln

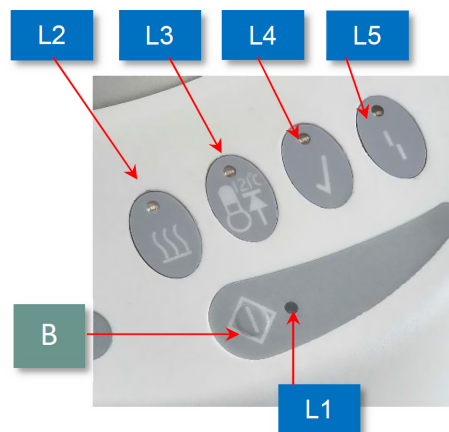

6. Trycksänkning

När steriliseringscykeln är fullbordad måste trycket i enheten sänkas och enheten måste svalna innan locket kan öppnas och de sterila instrumenten plockas ut.

Den tid som det tar innan det kan utföras riskfritt kan minskas genom att enhetens trycksänkkningsventil öppnas manuellt.

Öppna trycksänkkningsventilen (A) genom att sakta vrida den moturs*. Tryckindikatorn (C) sjunker när ångan släpps ut.

* Varning: Ångan kommer att ses och höras från baksidan av ångkanalen (H).



Öppen ventil



Stängd ventil

7. Upplåsning

När temperatur och tryck nått en säker nivå kan locket öppnas. Se till att trycksänkingsventilen (A) är öppen. Skruva av locket genom att vrida det moturs (F1).

För T-Classic Media modellen 210048, öppnas locket på annat sätt än de övriga modellerna.

När enheten nått en säker temperatur under 80°C lossar spärrmekanismen och locket kan låsas upp.

Ta av locket genom att trycka ner knappen för spärrmekanismen och vrid locket moturs.



8. Urplockning

Lyft av locket och placera det försiktigt upp och ner på en massiv arbetsyta och låt det svalna. Se till att trycksänkingsventilen (A) är stängd, så att den inte skadas.

Enheten har fullbordat en framgångsrik steriliseringsprocess om "fläcken" på TST-remsan har bytt färg från gul till lila*.

FÖR MEDIA - Korgen som innehåller steriliserad Media kan nu lyftas ur enheten försiktigt. Låt locket svalna 5 minuter före byte av media.

ANVÄND INTE MEDIA OM EN KOMPLETT STERILISERINGSCYKEL INTE GENOMFÖRTS

FÖR INSTRUMENT - Korgen eller kassetterna med steriliserade instrument kan nu lyftas ut ur enheten.

Undvik skador genom att sätta på locket igen enligt beskrivning i steg 3.

ANVÄND INTE INSTRUMENTEN OM EN KOMPLETT STERILISERINGSCYKEL INTE GENOMFÖRTS

* Var god lägg märke till att om punkten på TST-remsan inte fullständigt bytt färg ska en ny TST-remsa läggas i korgen och steriliseringen måste sedan göras om. Om punkten även denna gång inte fullständigt bytt färg, ska enheten inte användas förrän den kontrolleras av en kvalificerad tekniker.

9. Verifiering av steriliseringscykel

Vi rekommenderar att en TST remsa (121°C, 126°C, 134°C, beroende på vilken enhet du har) används vid varje laddning för att verifiera steriliseringscykeln. Placera helt enkelt indikatorremsan mitt i laddningen. TST remsor kan köpas av din återförsäljare.

* Var god lägg märke till att om punkten på TST-remsan inte fullständigt bytt färg ska en ny TST-remsa läggas i korgen och steriliseringen måste sedan göras om. Om punkten inte heller denna gång fullständigt bytt färg, ska enheten inte användas förrän den kontrollerats av en kvalificerad tekniker. I detta fall har steriliseringen inte genomförts korrekt, och instrumenten ska inte användas förrän de blivit korrekt steriliserade.

WARNING: Instrumenttillverkarna ska konsulteras avseende om instrumenten är anpassade för autoklavering och vilken den högsta temperaturen som instrumenten tål

10. Anslutning av skrivare (Podiacleve 210052 och Media (Endast 210048)

Anslut den medföljande 3,5 mm kontakten från skrivaren på baksidan av autoklaven på höger sida, se bild.

Läs instruktionerna som levereras med skrivaren för ytterligare instruktioner om korrekt handhavande och installation före användning.



Sektion 4: Fortsatt handhavande

För att säkerställa att din autoklav ger dig de tjänstgöringsår som den designades för är det viktigt att komma ihåg några "gör" och "gör inte" när det gäller driften av enheten och att utföra enkla skötsel- och underhållsprocedurer.

Se till:

- Att läsa dessa instruktioner och följ alltid handhavande sekvensen.
- Att arbetsytan där du placerar enheten är rak, solid och värmebeständig.
- Att instrumenten är designade för att tåla steriliseringstemperaturen, att de är ordentligt rengjorda och sköljda före sterilisering, och att de inte är längre än tillåten max. längd eller att de inte överstiger tillåten laddningsvikt, se "Tekniska specifikationer".
- Att vattennivån fylls på regelbundet med destillerat eller avjoniserat vatten.
- Att enheten står på en dragfri plats och att den står på ett avstånd om minst 250 mm från intilliggande väggar.
- Att du endast använder original Prestige Medical grön eller grå högtryckspackning och att den byts vid slutet av sin livslängd, om den är synligt skadad eller när den krympt, se "Fel - 5" i felsökningsguiden.
- Att locket är ordentligt stängt när enheten inte används, för att undvika risken för oavsiktlig skada. Lämna aldrig locket i läge som visas i F1. (Sida 5).
- Att du anger dina modelluppgifter, serienummer och inköpsdatum när du kontaktar Prestige Medical eller din återförsäljare.
- Att du byter vatten dagligen.

Undvik:


- Att ta på enheten när den körs - den blir HET.
- Att försöka ta av locket när enheten körs
- Att slarva bort denna bruksanvisning
- Att tillsätta några som helst kemikalier till vattnet
- Att försöka sterilisera flyktiga ämnen, giftiga material eller på annat sätt olämpliga laster.
- Att placera enheten på värmekänsliga ytor, polerat trä eller glas.
- Att öppna trycksänkingsventilen (A) under steriliseringscykeln
- Att lämnda trycksänkingsventilen (A) i öppet läge när locket placeras upp och ner på en arbetsyta.
- Att sänka ner enheten eller den elektriska sladden i vatten vid rengöring
- Att använda slipande material eller lösningsmedel vid rengöring
- Att tappa eller misshandla enheten.
- Att använda enheten i områden där det finns risker i samband med brännbara material eller gaser.
- Att försöka byta säkringar utan att enheten kopplats loss från elnätet. Endast kvalificerad personal skall byta säkringar.
- Att sträcka dig över enheten när locket tas av, att göra det kan orsaka brännskador från stigande hetta och ånga.
- Att trycka på start knappen när steriliseringscykeln har startat, eftersom detta återställer timern till 0 igen

Sektion 5: Daglig vård och underhåll

WARNING: Koppla från autoklaven från elnätet innan rengöring påbörjas

Grön eller grå packning

- Ta bort packningen från insidan av locket och rengör med varmt såpvatten.
- Skölj ordentligt, skaka torr, handdukstorka ej.
- Byt ut packningen genom att försiktigt placera den under placeringsklackarna. Se till att packningen sitter mot packningsförskjutningsanordningen (G.O.D.) som visas i bilden nedan. Observera att packningen kan verka något tilltryckt tills enheten har använts.
- Byt packningen när den börjar få synliga tecken på degradering eller läckage.

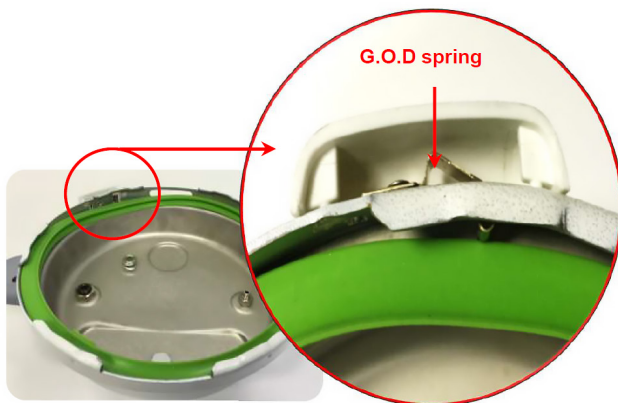

Autoklav

- Om en ny packning läcker, eller en ihållande läcka utvecklas, rengör försiktigt tätningssytan på både enhetens lock och kropp lätt med en svamp av nylon, se till att du inte tar bort någon metall. Skölj båda ytorna men torka inte
- Rengör både insidan och utsidan av enheten med varmt tvålatten och se till att de elektriska delarna hålls torra.
- Övervaka dagens första cykel för att kontrollera att evakueringsventilen, som finns inuti locket, hörbart "klickar" till (stängs).
- Smörj undersidan av kroppens klackar med "vaselin" om locket blir stelt.

SMÖRJ INTE PACKNINGEN

Sektion 6: Felsökning

Om ett fel inträffar under något skede av enhetens drift, identifiera felet genom att hänvisa till beskrivningarna nedan. Felet kan åtgärdas genom att följa den felåtgärd som gäller för problemet som inträffat Felindikation/Beskrivning/Åtgärd.

Fel nr 1: Ingen ström till enheten

Lampa: L1 lyser inte

Bränd säkring/ Defekt uttag/ Inte kopplad till elnätet

Säkerställ att enheten är kopplad till elnätet.

Kontrollera/byt säkring, kontrollera strömmen till uttaget

Fel nr 2: Kokat torr

Lampa: L5 blinkar rött

- Kontrollera vattennivå - låt enheten svalna före påfyllning till korrekt vattennivå.
- Kontrollera och säkerställ att trycksänkkningsventilen är stängd.
- Rengör tätningssytan på både enhetens lock och kropp

Kontakta service om felet upprepas efter att ovanstående kontrollerats och åtgärderna utförts.

Fel nr 3: Sterilisering har inte utförts

Lampa: L4 lyckas inte lysa grönt

Koppla loss från elnätet och återanslut enheten. Repetera steriliseringscykeln.

Om felet upprepas, kontakta service

Fel nr 4: Inkomplett steriliseringscykel

TST remsa byter inte färg helt eller delvis

Kontrollera utgångsdatum på TST remsorna. Koppla loss från elnätet och återanslut enheten. Repetera steriliseringscykeln.

Om felet upprepas, kontakta service

Fel nr 5: Ånga eller vatten läcker från under locket

- Sliten eller smutsig packning

Tvätta packning och anslutande ytor på enhetens lock och kropp som beskrivs under "vård och underhåll". Om felet består, byt packning

- Felaktigt stängt lock.

Säkerställ att enheten är helt utan tryck genom att öppna trycksänkingsventilen (A). Ta av locket och sätt försiktigt på det igen. Koppla från elnätet, återanslut och kör steriliseringscykeln igen.

Fel nr 6: Överflödig ånga eller vatten som läcker från trycksänkingsventil (A).

Trycksänkingsventilen står i "öppet" läge, stäng trycksänkingsventilen (A)

Fel nr 7: Inställningsproblem.

Lampa L1 blinkar kontinuerligt

Kontakta service

Utskrivna felkoder (Bara Media 210048 och Podiaclave 210052)

Om enheten går in i ett felläge (när en skrivare är ansluten) på grund av en driftsavvikelse kommer den automatiskt att skriva ut 1 av 10 felkoder nedan.

Kontrollera felkoderna och utför nödvändiga åtgärder.

01 ERROR_CODE_UNCALIBRATED

ÅTGÄRD: enheten kräver omkalibrering – Kontakta en servicetekniker.

02 ERROR_CODE_TIME_DATE_INCORRECT

Enhetens tid och datum är utanför räckvidden eller reservbatteriet börjar ta slut.

ÅTGÄRD: Kontakta en servicetekniker.

03 ERROR_CODE_VESSEL_OVERTEMP

Autoklavkärlets temperatur har överskridit maximal arbetstemperatur (>150°C).

ÅTGÄRD: Kontrollera vattennivån och fyll på till linjen. Om felet kvarstår, vänligen kontakta en servicetekniker.

04 ERROR_CODE_HEATING_BOIL_DRY

Ett torrkokningsförhållande har upptäckts under uppvärmningsfasen.

ÅTGÄRD: Kontrollera vattennivån och fyll på till linjen, kontrollera och rengör både packning och kärllkant. Om felet kvarstår, vänligen kontakta en servicetekniker.

05 ERROR_CODE_STERILISATION UNDERTEMP

Steriliseringstemperaturen har sjunkit under acceptabel nivå.

ÅTGÄRD: Kontrollera vattennivån och fyll på till linjen, sök efter läckor, kontrollera och rengör både packning och kärllkant. Om felet kvarstår, vänligen kontakta en servicetekniker.

06 ERROR_CODE_STERILISATION_OVERTEMP

Steriliseringstemperaturen har ökat över acceptabel maximal steriliseringstemperatur.

ÅTGÄRD: Kontrollera vattennivån och fyll på till linjen. Om felet kvarstår, vänligen kontakta en servicetekniker.

07 ERROR_CODE_SERIAL_NOT_SET

Produktens seriekod har inte ställts in (standard är 00000000).

ÅTGÄRD: Kontakta en servicetekniker.

08 ERROR_CODE_DWELL_STERILISATION BOIL_DRY

Steriliseringstemperaturen har blivit instabil.

ÅTGÄRD: Kontrollera vattennivån och fyll på till linjen, kontrollera och rengör både packning och kärllkant. Byt packning om den är sliten. Om felet kvarstår, vänligen kontakta en servicetekniker.

09 ERROR_CODE_DWELL STERILISERING PRE_BOIL_DRY

Steriliseringstemperaturen har blivit instabil.

ÅTGÄRD: Kontrollera vattennivån och fyll på till linjen. Om felet kvarstår, vänligen kontakta en servicetekniker.

10 ERROR_CODE_JUMPERS_PRODUCT UNKNOWN

ÅTGÄRD: Kontakta en servicetekniker.

Sektion 7: Tekniska specifikationer

	T-Classic One	T-Classic Plus	T-Classic Media	T-Classic Podiaclave
	210001	210004	210048	210052
Steriliseringstemperatur (-0,5/+1°C)	126°C	126°C	121°C	134°C
Steriliseringstid (min)	11 minuter	11 minuter	28 minuter	3 minuter
Max tid cykel (cirka)	22 minuter	22 minuter	70 minuter	20 minuter
Cykel Typ	N	N	-	N
Kärl kapacitet	9 l	12 l	12 l	9 l
Lastningsvikt max	3 kg	4 kg	2 x 500 ml	3 kg
Max bredd	340 mm	340 mm	340 mm	340 mm
Max höjd	335 mm	420 mm	420 mm	335 mm
Nettovikt	5,4 kg	6,3 kg	6,3 kg	5,4 kg
Effekt	1200W AC	1200W AC	1200W AC	1200W AC
Spänning	220-240V	220-240V	220-240V	220-240V
Frekvens	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Handtag typ	Standard	Standard	Med spärrmekanism	Standard
Lock Typ	Standard	Med mätare	Standard	Standard
Skrivare	Nej	Nej	Ja	Ja
Avsett gods	Oförpackat, solitt	Oförpackat, solitt	Endast Media	Oförpackat, solitt
Verksamhet	Veterinär, Utbildning, Hår, skönhet och fotvård	Veterinär, Utbildning, Hår och skönhet	Laboratorier och utbildning	Fotvård

Huvudsäkring (utbytbar av användare), F13A till BS1362 - Endast UK

Märkeffekt- Modellerna är avsedda för intermittent kontinuerlig användning.

Kärl - Djupt dragen aluminium.

Lock - Rostfritt stål

Värmare - Externt utanpåliggande mekaniskt fast element.

Temperaturavstängning - Termisk tripp.

Tryck - Kalibrerad tryckavlastningsventil.

Max. Enstaka fel temperatur - 133,3°C (210001, 210004 & 210048), 143°C (210052)

Överspänningskategori - Grupp II

Miljöförhållanden - inomhusbruk - temperatur 5°C till 40°C - höjd upp till 2000m - maximal relativ luftfuktighet 80% för temperaturer upp till 31°C minskande linjärt till 50% relativ luftfuktighet vid 40°C.

Nätspänningsfluktuationer får inte överstiga +10 % av den nominella spänningen- Ingående strömanslutning Kontakt enligt IEC 302.

Säkerhetsavstängning - Se "Temperaturavstängning".

Paketering - Allt förpackningsmaterial är återvinningsbart

Säkerhetsfunktioner

För det osannolika fallet att något skulle gå fel har vi införlivat flera säkerhetsfunktioner för att se till att din autoklav alltid är säker.

1. På baksidan av locket, under locket, finns en fjäder som kallas Gasket Offset Device (GOD Fjäder) "packningsförskjutningsanordning". Denna har utformats för att förhindra att tryck byggs upp om locket är felaktigt monterat.

MIXTRA INTE MED DENNA SÄKERHETSFUNCTION

2. Om temperaturen av någon anledning faller under den lägsta erforderliga steriliseringstemperaturen, kommer lampa (L5) att tändas. Stäng av enheten och låt den svalna. Slå sedan på den igen. Kontrollera packningen och vattennivån, fyll på vid behov. Kör en ny cykel och om felet kvarstår kontakta en servicetekniker

3. Om det finns ett elektriskt eller elektroniskt fel som resulterar i en uppbyggnad av tryck - mer än normalt driftstryck - kommer en eller alla följande säkerhetsfunktioner att aktiveras.

i) Trycksänkingsventilen kommer ljudligt och snabbt att "ventilera" ånga. Övertryckssäkerhetsventilen som är placerad under handtaget kommer ljudligt och snabbt att ventilera ut ånga så att den kommer ut via ångkanalen.

ii) Packningen kommer att "extrudera" genom skåran på baksidan av locket och släpper snabbt övertryck och ånga.

iii) En automatiskt återställande termisk säkring finns i enhetens bas. Denna aktiveras automatiskt om fel skulle inträffa med enheten.

OBS: När maskinen har svalnat tillräckligt, återställs den termiska säkringen. Detta gör att enheten kan slås på igen. Det rekommenderas att du ordnar en omedelbar service efter detta.

Om någon av de listade säkerhetsfunktionerna aktiveras, följ följande steg:

a) Rör inte enheten.

b) Dra ur kontakten i vägguttaget.

c) Låt temperatur och tryck sjunka innan du rör vid enheten eller tar ur dina instrument.

d) Försök inte starta om enheten.

e) Ordna omedelbar service.

Sektion 8: Ytterligare information

Reservdelar

Endast de reservdelar som tillhandahålls eller specificeras av Prestige Medical ska användas vid underhåll av autoklaven. Användning av icke auktoriserade delar kommer att ogiltigförklara alla givna garantier och kan ha en negativ inverkan på enhetens prestanda och säkerhet.

Tillbehör

En rad tillbehör finns tillgängliga för din autoklav enligt beskrivningen nedan. Kontakta din återförsäljare för ytterligare information. Ange alltid enhetens modellnummer för återförsäljaren för att säkerställa att rätt och lämpliga tillbehör levereras.

1. 219500 – Grön silikontätningsspackning (T-Classic One 210001, T-Classic Plus 210004 och Media endast 210048)
2. 219759 – Grå silikontätningsspackning (endast Podioclave 210052)
3. 219277 – 126°C TST-indikatorremсор
4. 259277 – 121°C/134°C TST-indikatorremсор
5. 219258 – Strömsladd UK
6. 219297 – Strömsladd EU
7. 219294 – Lyftanordning
8. 219708 – 9 liter Korg
9. 219720 – 12 liter Korg
10. 219291 – Kassetlåda
11. 219706 – Kassetställ
12. 219740 – Kassettring
13. 219706 – 3 Kassetter & Kassetthållare
14. 279520 – Skrivare UK (endast Podioclave 210052 och Media 210048)
15. 279519 – Skrivare Euro (endast Podioclave 210052 och Media 210048)
16. 279505 – Skrivarpapper rulle, pack of 10 (endast Podioclave 210052 och Media 210048)

Garanti

Prestige Medical ska under de första 12 månaderna från inköpsdatumet, kostnadsfritt reparera eller byta ut eventuella delar som visar sig vara defekta i utförande och/eller material.

Prestige Medical ansvarar inte för detta om köparen inte har följt instruktionerna i denna bruksanvisning eller om autoklaven har missbrukats, störts, ändrats, reparerats eller servats av någon obehörig part. Detta kan också leda till att det skydd som tillhandahålls av utrustningen blir nedsatt.

Denna garanti omfattar inte packningen, alla invändiga tillbehör eller förbrukningsvaror.

Produktdekontaminering

Om enheten skulle behöva repareras måste den dekontamineras i enlighet med ett erkänt förfarande innan den returneras eller repareras på plats. En redogörelse för utrustningens kontamineringsstatus måste finnas tillgänglig med produkten. (Uppgifter om en lämplig procedur finns tillgänglig på begäran).

Översensstämmelser

Obs: Fråga efter detaljer om godkännanden som är specifika för din modell.

- ASME VIII Division 1 2019 – Tryckkärl
- Direktiv 2014/30/EU – Elektromagnetisk kompatibilitet
- Direktiv 2014/35/EU – Lågspänningsdirektiv
- Direktiv 2014/68/EU – Direktivet för tryckutrustning
- Direktiv 2012/19/EU – direktivet om avfall från elektrisk och elektronisk utrustning

Överensstämmelse med standarder

- EN ISO 13485:2016 Kvalitetsledningssystem
- EN ISO 14971:2019 Tillämpning av riskhantering på medicinsk utrustning
- BS EN 13060:2014+A1:2018 små ångsterilisatorer
- BS EN 61010-1:2019 Säkerhetsstandard för elektrisk utrustning
- BS EN 61010-2-040:2020 Säkerhetskrav för elektrisk utrustning till mätning, styrning och laboratorieanvändning.
- BS EN 61326-1:2013 Elektromagnetisk kompatibilitet
- EN ISO 15223-1:2021 Symboler som ska användas på medicinska anordningars etiketter, märkning och information som ska levereras.

Elektromagnetisk omgivning:

T-Classic autoklaven är utformad för användning i följande miljöer: laboratorium, utbildning, hår & skönhet samt fotvård. Enheten bör placeras minst 1,5 m bort (radie) från alla slutanvändare.

T-Classic-enheten är en klass B-grupp 1, enligt CISPR11-standard.

Rengöringsmaterial

- Milt diskmedel
- Icke-slipande krämrengöringsmedel
- Desinfektionsmedel utspätt i vatten - icke klorbaserat

Förpackning

Allt förpackningsmaterial som används är återvinningsbart, vänligen kassera i enlighet med detta.

WEEE-deklaration (avfall från elektrisk och elektronisk utrustning)

WEEE-direktivet innebär en skyldighet för alla EU-baserade tillverkare och importörer att ta tillbaka elektroniska produkter vid slutet av sin livslängd. Prestige Medical Limited accepterar sitt ansvar för att finansiera kostnaden för behandling av överflödigt WEEE i enlighet med de specifika återvinningskraven.

Bortskaffande

Symbolen (visas nedan) finns på alla Prestige Medical Products, vilket indikerar att produkten INTE får slängas tillsammans med annat avfall. Istället är det användarens ansvar att slänga sitt avfall från elektrisk och elektronisk utrustning genom att överlämna den till en godkänd återvinningscentral, eller kontakta ditt lokala stadskontor eller din återförsäljare för information.

